



Littmann[®]
Stethoscopes

Tipy pro čištění a péči

3M[™] Littmann[™] fonendoskop je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý servis. Rutinní čištění fonendoskopu zajistí optimální akustický výkon.



Dekontaminace fonendoskopu je poměrně jednoduchý postup, který vyžaduje pouze tampón napuštěný 70% isopropylalkoholem a očištění celého povrchu membrány a / nebo zvonku. To by mělo být provedeno mezi každým pacientem a ideálně těsně před použitím. Hadičky fonendoskopu jsou často opomíjené a doporučujeme jejich vyčištění měkkým hadříkem navlhčeným v jemném mýdlovém roztoku, a také pomocí tampónů napuštěných 70% isopropylalkoholem.

K dezinfekci fonendoskopu lze také použít 2% bělicí roztok; nicméně, při nadměrném používání může dojít k mírnému zbarvení hadičky po vystavení bělidlu.

- Fonendoskop nevystavujte žádným sterilizačním procesům
- Fonendoskop neponořujte do žádné kapaliny

Společnost 3M si uvědomila, že někteří kliničtí lékaři používají k čištění svých fonendoskopů dezinfekční prostředky na ruce.

Dezinfekční prostředky na ruce obsahují zvlhčovače, které mohou způsobit bobtnání a vypadávání jednodílných membrán, proto se tato praxe nedoporučuje.