

Pokyny pro nasazení

Před nasazením mějte vždy čisté ruce.




**Virus and Bacteria
Filtration**



NANO FIBER MASK A

Jak se nasazuje maska s úvazky:

1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Utřete si ruce a předtím, než vezmete masku do ruky, použijte dezinfekci na ruce.
2. Vyjměte masku z krabice a ujistěte se, že není ani z jedné strany natržená nebo protržená.
3. Zjistěte, která strana masky patří nahoru. Nahoru patří ta strana masky, která má vyztužený ohybatelný okraj, který se má přizpůsobit tvaru nosu.
4. Přidržte si masku na úrovni nosu a natáhněte šňůrky přes temeno hlavy a zavažte je na kličku.
5. Vyztužený okraj vytvarujte podle tvaru svého nosu.
6. Pak uchopte spodní šňůrky, do každé ruky jednu, a zavažte je na zátylku.
7. Přetáhněte spodní okraj masky přes ústa a bradu.

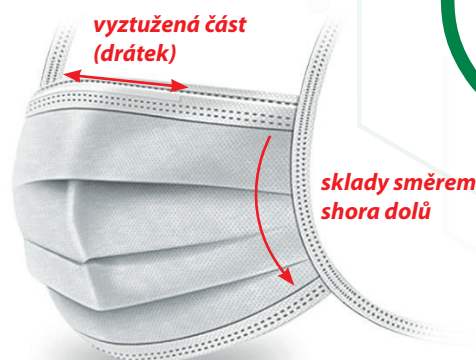


Jak se sundává maska s úvazky:

Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Utřete si ruce a předtím, než na masku sáhnete, použijte dezinfekci na ruce. Nedotýkejte se přední strany masky. Přední strana masky je kontaminovaná. Dotýkejte se pouze šňůrek.

1. Nejprve rozvažte spodní kličku a poté horní kličku a jakmile jsou šňůrky volné, sejměte masku z obličeje. Snažte se nedotýkat se přední strany masky a držte ji pouze za šňůrky.
2. Vyhodte masku do odpadu. Umyjte si ruce vodou a mýdlem a použijte dezinfekci na ruce.

Jednorázové masky by měly být používány pouze jednou a poté vyhozeny do odpadu. Masku byste měli sundat a vyměnit také v případě, že je vlhká.

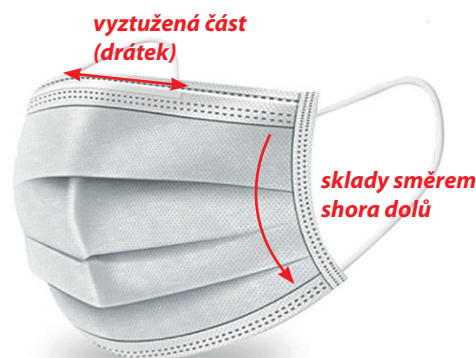

NANO FIBER MASK B

Jak se nasazuje maska s gumičkami:

1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Utřete si ruce a předtím, než vezmete masku do ruky, použijte dezinfekci na ruce.
2. Vyjměte masku z krabice a ujistěte se, že není ani z jedné strany natržená nebo protržená.
3. Zjistěte, která strana masky patří nahoru. Nahoru patří ta strana masky, která má vyztužený ohybatelný okraj, který se má přizpůsobit tvaru nosu.
4. Držte masku za poutka. Zahákněte poutka za uši.
5. Vyztužený okraj vytvarujte podle tvaru svého nosu.
6. Přetáhněte spodní okraj masky přes ústa a bradu.

Jak se sundává maska s gumičkami:

Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Utřete si ruce a předtím, než na masku sáhnete, použijte dezinfekci na ruce. Nedotýkejte se přední strany masky. Přední strana masky je kontaminovaná. Dotýkejte se pouze gumiček.

1. Uchopte obě gumičky a opatrně zvedněte a sejměte masku. Snažte se nedotýkat se přední strany masky a držte ji pouze za gumičky.
2. Vyhodte masku do odpadu.
3. Umyjte si ruce vodou a mýdlem.
4. Utřete si ruce a použijte dezinfekci na ruce.

Jednorázové masky by měly být používány pouze jednou a poté vyhozeny do odpadu. Masku byste měli sundat a vyměnit také v případě, že je vlhká.